

mediCipio® A Dvouvrstvá matrice na podporu lokální hemostázy

Informace k použití

Popis výrobku:

mediCipio®A je sterilní, zcela odbouratelná matrice vyrobená z oxidované regenerované celulózy (ORC) a kolagenu. Pro snazší rozlišení jsou ORC složky zbarveny žluté riboflavinem. Vrstvenaté uspořádání a přidání glycerolu vedou k flexibilní struktuře.

Složení:		
- oxidovaná regenerovaná celulóza	-	riboflavin (barvivo E 101)
- kolagen vepřového původu	-	glycerol

Oblasti použití:

mediCipio®A je mechanicky působící hemostyptikum, které se používá invazivně a neinvazivně jako podpůrné lokální opatření ke zlepšení hemostázy v případě difuzního a rozsáhle prosakujícího krvácení a k utěsnění tkáně.

Působení:

mediCipio®A poskytuje matici pro tvorbu krevní sraženiny. V důsledku příjmu tekutin se faktory sražení krve a trombocyty koncentrují lokálně, takže se na požadovaném místě zvyšuje sražení krve. mediCipio®A také tvoří bariéru proti průtoku krve.

Pokyny k aplikaci:

mediCipio®A je zabalen dvojitě. Oba obaly lze odlopnout. První, vnější průhledný obal, je sterilní bariérový systém. Vnitřní obal na ochranu před světlem chrání žlutou vrstvu ORC před zbarvením. Oba obaly by měly být otevřeny až bezprostředně před použitím. Produkt připravený k okamžitému použití musí být vyjmut a použit za sterilních podmínek. Doporučuje se před aplikací zvlhčit suché rány vhodným fyziologickým oplachovým roztokem. **Žlutá strana** mediCipio®A by měla být umístěna na ránu a fixována po dobu 3 až 5 minut jemným tlakem. Počet a velikost produktů závisí na tkáni, která má být ošetřena. Pokud je použito více produktů, musí být tyto uloženy s překrývajícími se stranami. V případě potřeby je možné přizpůsobit na správnou velikost. Manipulaci usnadňují suché rukavice a chirurgické nástroje. Použijte pouze tolik materiálu, kolik je potřeba. Při každém použití mediCipio®A se doporučuje dokumentovat jméno pacienta a číslo šarže produktu. mediCipio®A má zůstat v oblasti aplikace, ale může být také odstraněn, pokud je to nutné, po ukončení působení. To se doporučuje v kritických oblastech, jako je blízkost nervů nebo citlivé tkáně.

Kontraindikace:

mediCipio®A je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na alespoň jednu ze složek dvouvrstvé matrice. mediCipio®A netlačte do krevních cév ani jej neaplikujte intravaskulárně. mediCipio®A je v infikovaných oblastech kontraindikován. mediCipio®A nepoužívejte jako produkt k zabránění lepení.

Varování, bezpečnostní opatření:

K použití jsou určeny pouze výrobky z nepoškozeného obalu. Po otevření obalu nesmí být produkt skladován pro pozdější použití. Nesmí se provádět opakovaná sterilizace radiálně sterilizované matrice. Předčasný kontakt produktu s kapalinou snižuje zamýšlený výkon a je třeba mu zabránit. mediCipio®A je určen pouze k jednorázovému použití. Opětovné použití skrývá možná rizika infekce a zamýšlený výkon již není dán.Vhodná opatření, jako např. čištění oblasti rány mohou zabránit slepení okolní tkáně. Opatrnost se doporučuje u pacientů s poruchami srážlivosti, protože to může vést k prodloužené hemostáze a/nebo k méně vyvinutému okluzivnímu trombu. Nejsou žádné zkušenosti s použitím u dětí, těhotných a/nebo kojících žen. Rovněž nejsou žádné zkušenosti s použitím v bezprostřední blízkosti kostí. Proto by takové aplikace měly být prováděny pouze tehdy, pokud očekávaný přínos jednoznačně převažuje nad rizikem při individuálním posouzení poměru rizik a přínosů ošetřujícím lékařem.

Interakce:

Dosud nejsou známy.

Vedlejší účinky:

Dosud nejsou známy.

Trvanlivost:

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
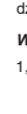
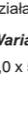
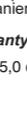
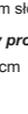
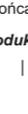
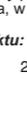
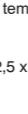
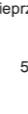
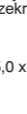
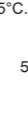
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
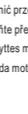
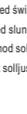
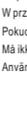
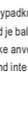
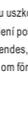
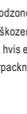
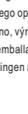
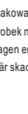
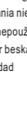
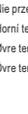
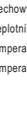
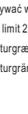
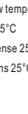
Při správném skladování je doba trvanlivosti 5 let.

Pokyny pro skladování:

mediCipio®A se má skladovat v suchu, s ochranou před přímým sluncem a při teplotě ne vyšší než 25 °C.

Varianty produktu:

1,0 x 5,0 cm | 2,5 x 3,0 cm | 5,0 x 5,0 cm | 5,0 x 10,0 cm

																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

