



Kollagen-Wundauflage einzeln, steril verpackt

Packungsgrößen

S [4,5 x 5,5 cm] 5 Stück | EAN 0701197926219

M [4,5 x 11 cm] 5 Stück | EAN 0701197926233

L [9 x 11 cm] 5 Stück | EAN 0701197926257

S [4,5 x 5,5 cm] 10 Stück | EAN 0701197926226

M [4,5 x 11 cm] 10 Stück | EAN 0701197926240

L [9 x 11 cm] 10 Stück | EAN 0701197926264

Sondergrößen auf Anfrage möglich.



medichema GmbH

Weststraße 57

09112 Chemnitz / Germany

Tel.: +49 (0) 371 90 96 838 • Fax: +49 (0) 371 90 96 839

info@medichema.com • www.medichema.com



**Die reine
Kollagen-Wundauflage**

mediCipio® **C**

**Was in der Humanmedizin
erfolgreich etabliert ist,
soll der Tiermedizin nicht
vorenthalten werden.**

mediCipio®[®]


ist eine resorbierbare Wundauflage zur Behandlung von schlecht heilenden Wunden und akuten traumatischen Defekten.

mediCipio®[®]

besteht aus >99 % Kollagen aus dem Corium vom Bio-Schwein.

mediCipio®[®]

fördert die Wundheilung in den drei Phasen:

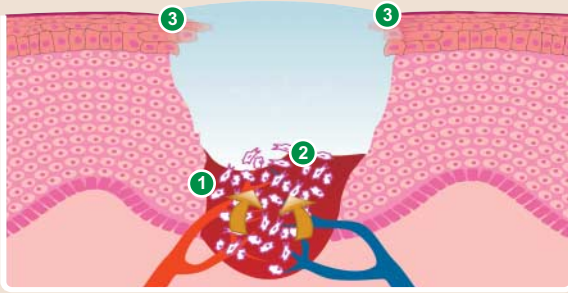

1 Entzündungs- und Reinigungsphase:

mediCipio®[®] absorbiert durch seine besondere Porenstruktur vorhandenes Exsudat. Dadurch wird eine Gelschicht gebildet, die ein ideales feuchtes Wundmilieu schafft. Weiterhin werden durch die Kollagen-Wundauflage heilungshemmende Faktoren z.B. Zytokine, freie Radikale und Proteasen inaktiviert.

2 Granulationsphase

mediCipio®[®] fördert die Einwanderung von Makrophagen und Fibroblasten. Daraus resultiert eine gesteigerte Bildung von körpereigenem Kollagen.

3 Wundverschlussphase (Epithelisierungsphase):

mediCipio®[®] fördert zudem die Migration und Proliferation von Epithelzellen und ist somit aktiv am Wundverschluss beteiligt.

Indikationsgebiete

- schlecht heilende Wunden
- Zustand nach Spalthaut-transplantationen
- Brandwunden
- Wundhöhlen
- operative Gewebsdefekte

Vorteile auf einen Blick

Förderung der Wundheilung

- hohe Kapillarenaktivität schafft ein feuchtes Wundmilieu
- Inaktivierung von wundheilungsstörenden Faktoren
- begünstigt die Bildung von körpereigenem Kollagen
- beschleunigt eine nachhaltige Epithelisierung

flexible und einfache Anwendung

- leicht form- und schneidbar
- auf jede Wunde anpassbar
- sofort anwendungsbereit

sicher

- überragende Biokompatibilität
- frei von Bakterien, Viren und TSE-Erregern
- entzündungshemmend
- geringe Immunogenität
- senkt den pH-Wert der Wunde und reduziert somit das Risiko für sekundäre Keimbesiedlungen

vollständig resorbierbar

- kein Verkleben mit dem Wundgrund
- schmerzfrei bei Verbandserneuerung

kein unangenehmer Eigengeruch

Anwendungsbeispiele



Beispiel A: Vollblut, Stute, 4 Jahre alt

Bild A1: Hautdrucknekrose vo. re., ca. 3,5 cm x 3 cm, mgr. exsudativ, Wundstagnation seit 3 Wochen

Bild A2: Wundbild nach 26 Tagen

Therapie: Wundspülung, **mediCipio®[®]** auf Wundgrund, VBW alle 2 - 3 Tage in Abhängigkeit vom Wundexsudat

Beispiel B: Tinkerfohlen, 1 Monat alt

Bild B1: Verletzung lateral im Bereich Metatarsus ca. 10 x 4 cm große Wunde, mgr. exsudativ, Knochen freiliegend auf ca. 4 cm x 1 cm, Wundverlauf stagnierend

Bild B2: Wundbild nach 10 Tagen

Therapie: Wundspülung, **mediCipio®[®]** auf Wundgrund, VBW alle 3 Tage